

LES LIQUIDES CYTOLOGIQUES

Les liquides doivent être envoyés au laboratoire le plus rapidement possible.

Si le liquide ne peut être envoyé immédiatement, il devra être conservé au froid (4- 8°C) jusqu'au moment de l'envoi.

Une quantité de 1 à 2 ml au moins est nécessaire pour la réalisation d'une cytocentrifugation.

Afin de préserver au mieux la morphologie des cellules prélevées il est vivement conseillé d'accompagner le liquide d'étalements extemporanés du liquide réalisés au chevet du malade. Réaliser dans ce cas en les identifiant :

- un ou plusieurs étalements directs
- et si le liquide semble peu cellulaire (LBA par exemple) et qu'il a été recueilli en quantité suffisante, un étalement du culot de centrifugation

EPANCHEMENT LIQUIDE SYNOVIAL	LBA	URINE
Tube EDTA Liquide non centrifugé + Etalement direct + Etalement du culot de centrifugation	Tube EDTA Liquide non centrifugé + Etalement du culot de centrifugation	Tube sec Urine non centrifugée + Etalement direct + Etalement du culot de centrifugation